

Gebruik verankeringssysteem rolstoelen caddy

- Indien de persoon kan plaatsnemen op de **zetel** moet dit omdat dit steeds de **veiligste manier van vervoeren** is.
- Indien de persoon in zijn **rolstoel** moet blijven zitten moet de verankering **altijd** op een correcte manier gebeuren met alle **4 de verankeringspunten** en de **personengordel** van de bus. (de gordelplicht blijft!)

VERANKEREN/KLAARLEGGEN VAN DE GORDELS IN DE BUS

Controleer voor je een rolstoel in de bus plaatst steeds als de gordels goed in de grond zitten vastgemaakt en alle gordels binnen handbereik liggen.


Zorg dat de doorgang vrij is en alle gordels binnen je bereik liggen.



Indien nodig kunnen de voorste gordels losgemaakt worden om vlot in te rijden door dop omhoog te trekken en het geheel opzij te schuiven.



Duw de schakelaar in zodat het lichtje gaat branden, zo zijn de gordels ontgrendeld.

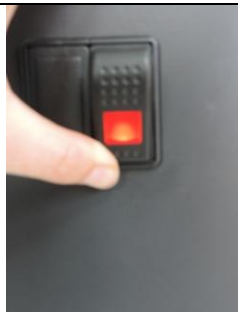

ROLSTOEL VASTZETTEN

Breng de 4 verankerpunten aan


Plaats de rolstoel voor de caddy.
Zet de remmen vast en verbindt de rolstoel met de gordels.



Elke rolstoel heeft verankerpunten vastgelegd door de firma met een crashtest. Deze punten moeten gebruikt worden.



Rijd met de rolstoel in de caddy en zet de remmen van de rolstoel vast. Vergrendel het gordel systeem door terug op de knop te duwen zodat het licht uitgaan.

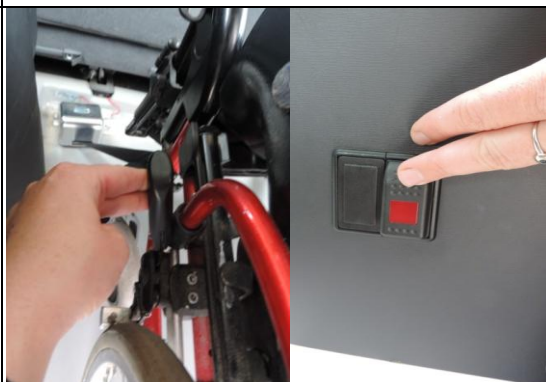

Voor de gordels achteraan duw je op het rode pinnetje, om de gordels te ontrollen.



Bevestig de gordels aan de achterkant van de rolstoel. Let op de verankerpunten aangeduid door de firma.



Span de gordel aan door aan het wieltje te draaien.



De Personen gordel.

Alle personen in een auto hebben gordel plicht, ook de mensen in een rolstoel. De gordel van de rolstoel zelf is onvoldoende.

Breng aan de linkerkant het losse stuk gordel aan



Breng het rechtse stuk van de gordel aan. Haak het uiteinde met de lus over het slot onderaan rechts. Idem hierboven.

Breng het stuk met de gordelsluiting vooraan naar de buik van de persoon en sluit met de linkerkant.



Bij het aanbrengen van de personengordel moet deze van heup naar heup lopen en niet over de rolstoel leuning.

Het stuk dat naar boven loopt moet zoveel mogelijk over de schouder van de bewoner lopen.



UITSTAPPEN

Verwijder de personen gordel.

Duw op de rode pin achteraan de rolstoel om de banden te ontgrendelen en de achterste banden los te maken.



Duw op de schakelaar om de gordel te ontgrendelen. Je kan de remmen van de rolstoel losdoen en uit de Caddy rijden.

Maak de gordels van de voorkant los en laat deze zacht terug inrollen. Vergrendel ze door op de knop te duwen.

